

## STURZ-ALARM MIT EINGEBAUTER NOTRUFTASTE UND GPS-FUNKTION



Wichtig: Gerät zunächst vier Stunden in mitgelieferter Ladestation aufladen. Rote LED am Ladegerät erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Vor Inbetriebnahme: **Aktivierte Micro-SIM-Karte OHNE PIN-Code mit einem Abonnement oder ausreichend Gesprächsguthaben in das Gerät einsetzen.**

- 3 Schrauben auf der Rückseite des Gerätes lösen.
- SIM-Kartenhalterung öffnen und SIM-Karte einsetzen.
- Gerät mit den 3 Schrauben und mitgelieferten Gummidichtungen gut verschließen.

### Gerät ein- und ausschalten

- Seitlichen Ein/Aus-Schalter 1 Sekunde gedrückt halten. Alle LEDs leuchten auf und Gerät wird eingeschaltet. Gerät schaltet automatisch ein, wenn man es auf die Ladestation setzt.
- Gleichzeitig 1 Sekunde auf Ein/Aus-Taste und SOS-Taste drücken, um Gerät auszuschalten.

## Programmieren der autorisierten Rufnummern (Notrufnummern)

Es können bis zu 3 Rufnummern programmiert werden: A, B und C  
Zum Programmieren der ersten Notfallnummer folgende SMS ohne Leerzeichen senden:

**a1,123456789**

Zum Programmieren der zweiten Notfallnummer folgende SMS ohne Leerzeichen senden:

**b1,123456789**

Zum Programmieren der dritten Notfallnummer folgende SMS ohne Leerzeichen senden:

**c1,123456789**

Gerät antwortet 3x mit der SMS „PROGRAMMIERUNG  
MOBILFUNKNUMMER 1,2,3 ERFOLGREICH“

Dies ist nur ein Beispiel für die Rufnummer 123456789. In der Praxis fangen die Rufnummern mit denen z.B. in Deutschland üblichen Mobilfunkvorwahlen an.

Zum erneuten Löschen einer Rufnummer sendet man die gleichen SMS-Kommandos, aber diesmal mit einem „B“. Um z.B. die zweite Rufnummer zu löschen, sendet man die SMS:

**B0**

## Überprüfen der eingehenden Anrufe

Wenn sich nur autorisierte Rufnummern einwählen und die Freisprechfunktion nutzen dürfen, sendet man die SMS:

**Z0**

Wenn alle Rufnummern sich einwählen und die Freisprechfunktion nutzen dürfen, sendet man die SMS:

**Z1**

## Position des Gerätes abfragen

Die programmierten, autorisierten Rufnummern können die Position des Gerätes jederzeit abfragen. Dafür sendet man die SMS:

**loc**

Das Gerät antwortet per SMS mit einem Google-Maps-Link. Auch der Ladezustand des Akkus wird übermittelt.

### Meldung Ladestand niedrig 20%

Alle autorisierten Rufnummern können eine SMS erhalten, wenn der Ladezustand des Akkus unter 20% beträgt.

Um diese Funktion zu aktivieren, sendet man die SMS:

**Low1**

Um diese Funktion zu deaktivieren, sendet man die SMS:

**Low0**

### Einstellen des Pieptons durch Drücken der SOS-Taste

SOS-Taste zur Aktivierung 3 Sekunden gedrückt halten. Dann vibriert das Gerät, um das Versenden des Notrufs zu bestätigen. Man kann das Gerät auch so einstellen, dass es zusätzlich ein akustisches Signal (Piepton) zur Bestätigung abgibt.

Aktivieren, SMS: **beep1**

Deaktivieren, SMS: **beep0**

### Einstellen der Klingelfunktion mit seitlicher Taste

Man kann festlegen, welche der autorisierten Rufnummern angewählt werden soll, wenn man auf die seitliche Taste drückt. Nicht die SOS-Taste und kein Notruf, sondern eine Freisprechverbindung.

Erste Rufnummer,

SMS: **X1**

Zweite Rufnummer,

SMS: **X2**

Dritte Rufnummer,

SMS: **X3**

### Einstellen der Sturz-Alarm-Funktion

*WICHTIG: DIE STURZ-ALARM-FUNKTION LÖST MANCHMAL NICHT AUS, DAHER SOLLTE DIE BETROFFENE PERSON AUS SICHERHEITSGRÜNDEN WENN MÖGLICH DENNOCH DIE SOS-TASTE DRÜCKEN!*

Empfindlichkeit:

Einstellbar von 1 (sehr empfindlich) bis 9 (am wenigsten empfindlich). Die Empfindlichkeitsstufe ist auf 5 voreingestellt.

Soll die Empfindlichkeitsstufe geändert werden soll, sendet man die SMS:

für Empfindlichkeitsstufe 1: **FL1,1**  
für Empfindlichkeitsstufe 9: **FL1,9**

Notruf-Benachrichtigung:

Standardmäßig bekommen alle autorisierten Rufnummern eine SMS im Falle eines Sturz-Alarmes. Es wird jedoch empfohlen, alle Notrufnummern anzuwählen.

Dafür sendet man die SMS: **FL2**

#### Ausgehende Anrufe einstellen

Standardmäßig bekommen alle autorisierten Rufnummern eine SMS im Falle einer SOS-Meldung. Es wird jedoch empfohlen, alle Notrufnummern anzuwählen. Die angewählten Rufnummern können dann das Gespräch annehmen und direkt mit der Person sprechen.

Um das Anrufen aller Notrufnummern zu aktivieren, sendet man die SMS: **CALL1**

#### Werkseinstellungen.

Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass alle Ihre persönlichen Einstellungen verloren gehen und das Gerät komplett neu programmiert werden muss.

Zum Zurücksetzen sendet man die SMS: **RESET!**

TN-Invest,  
Esdoornstra  
at 52, B-  
8300  
Knokke-  
Heist,  
Belgien

[info@seniorenalarme  
n.be](mailto:info@seniorenalarme.n.be)

[info@seniorenalarme.nl](mailto:info@seniorenalarme.nl)